

## Statim (alle Modelle)

Bevor Sie das Gerät verpacken, beachten Sie bitte folgende Punkte und stellen Sie bitte sicher, dass:

- Alle **Stellfüße komplett eingeschraubt** sind
- **Der Wassertank vollständig entleert ist\***
- Nehmen Sie die **Kassette aus dem Gerät** (aber unbedingt mit senden)
- Nehmen Sie einen **starken Karton**, der ausreichend Platz bietet für Stoßdämpfungsmaterial (kein Zeitungspapier), **am besten den Original-SciCan-Karton**.
  - Beim Originalkarton die mitgelieferten Stoßdämpfeinlagen verwenden und das Gerät darin richtig platzieren
- Kleben Sie den **Tankdeckel nicht mit zu stark haftendem Klebestreifen** fest
- Verpacken Sie das **Gerät wenn möglich mit einem Plastiküberzug**, sodass das Gerät vor Kratzern geschützt wird und kein Dämpfungsmaterial z.B. Styroporchips in den Kassettenschacht und das Wasserreservoir geraten kann.
- **Netzkabel, Abflussschlauch und Abwasserflasche werden nicht benötigt** (sofern diese nicht bemängelt werden)

## Hydrim (alle Modelle)

Bevor Sie das Gerät verpacken, beachten Sie bitte folgende Punkte und stellen Sie bitte sicher, dass:

- Das Gerät für den Versand gemäß der Bedienungsanleitung vorbereitet wird\*
- Nehmen Sie einen **starken Karton**, der ausreichend Platz bietet für Stoßdämpfungsmaterial (kein Zeitungspapier), **am besten den Original-SciCan-Karton**.
  - Beim Originalkarton die mitgelieferten Stoßdämpfeinlagen verwenden und das Gerät darin richtig platzieren
- Verpacken Sie das **Gerät, wenn möglich mit einem Plastiküberzug**, sodass das Gerät vor Kratzern geschützt wird und kein Dämpfungsmaterial z.B. Styroporchips das Gerät geraten kann.
- **Netzkabel, Abwasserschläuche, LCS-Schiene (beim Hydrim C61 LCS), sonstiges Zubehör werden nicht benötigt** (sofern diese nicht bemängelt werden).

## Statmatic


Bevor Sie das Gerät verpacken, beachten Sie bitte folgende Punkte und stellen Sie bitte sicher, dass:

- Bitte achten Sie darauf, dass beim Statmatic **die Öldose vor dem Versand entfernt** wird\*
- Nehmen Sie einen **starken Karton**, der ausreichend Platz bietet für Stoßdämpfungsmaterial (kein Zeitungspapier), **am besten den Original-SciCan-Karton**.
  - Beim Originalkarton die mitgelieferten Stoßdämpfeinlagen verwenden und das Gerät darin richtig platzieren
- **Netzkabel, Luftschlauch und Adapter werden nicht benötigt** (sofern diese nicht bemängelt werden)


## Statmatic Plus / Statmatic Smart

Bevor Sie das Gerät verpacken, beachten Sie bitte folgende Punkte und stellen Sie bitte sicher, dass:

- **die Medien wie Reiniger und Öl vollständig entleert** sind\*
- Die **Sicherungsschraube** an der Medienbelüftung (siehe Zeichnung) **herausdrehen** und, mit Druckluft mehrfach in das Ventil blasen. Schraube wiedereinsetzen

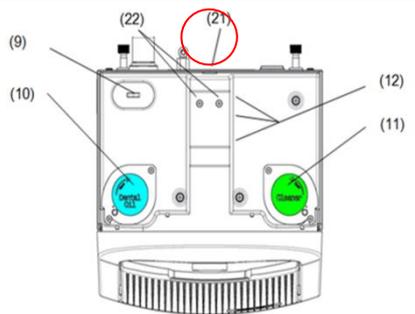

- Mitgelieferte Verschlussstopfen in die Befüllungstrichter der Medienbehälter einsetzen

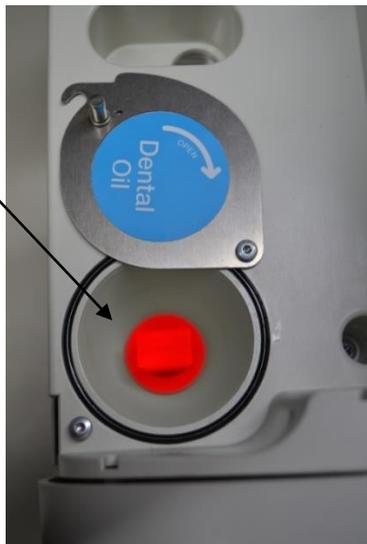

### Wichtiger Hinweis:

**Für eventuelle Schäden bei Missachtung** übernimmt SciCan GmbH keinerlei Haftung oder Gewährleistung und behält sich vor, Ihnen eine Pauschale von 85 Euro zzgl. MwSt. + exkl. Material in Rechnung zu stellen.

\* sind die Flüssigkeiten nicht vollständig entleert, kann dadurch beim Gerät die Elektronik beschädigt werden sowie die Verpackung selbst. Die genauen Hinweise in der Bedienungsanleitung beachten.